

プリコーションセット サージカルガウンPRS-801 着衣ガイド（着ける）

感染経路を断ち、安全を守るために

装備品 SMSガウン 手袋 キャップ マスク
 シューズカバー フェイスシールド



①靴の上からシューズカバーを履き
膝下までを覆うように装着します。

②足首のゴムを足に通して
足首を固定します。



③ガウンを取り出し、サイズ表記されている脇の折り返しに両手を入れて広げます。
（自然にガウンが展開します）




④マジックテープをつけ、首紐を結びます。




⑤内紐（白）を結びます。



⑥ベルトガイドのついた外紐を左脇で結びます。

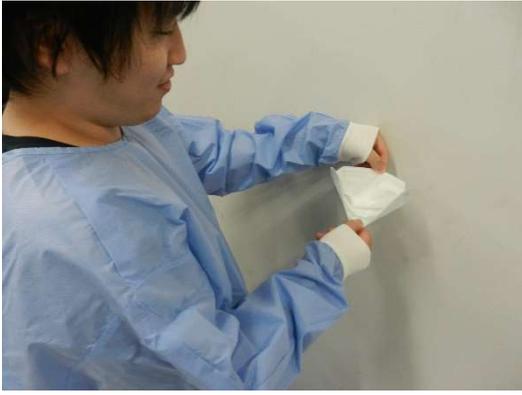


⑦マスクを上下に広げ、ノーズクランプを鼻に合うように軽く曲げます。

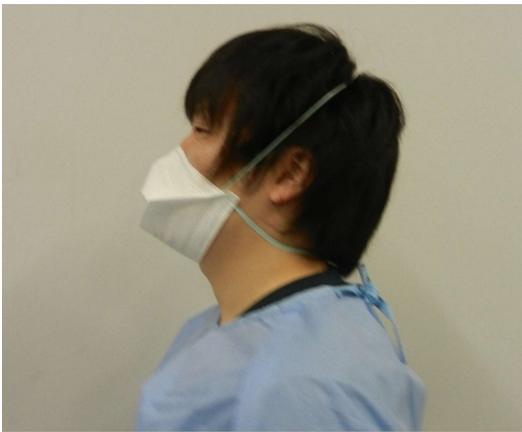

⑧マスクを顔に当て、上側ゴムを頭頂部に、下側ゴムを首にかけて固定します。隙間ができないようにノーズクランプを顔に合わせ、空気の漏れがないかフィットチェックします。



⑨キャップは髪の毛を全部覆うようにし、耳、襟足が隠れるようにかぶります。頸部を隠すように紐を回し、後ろで軽く結びます。

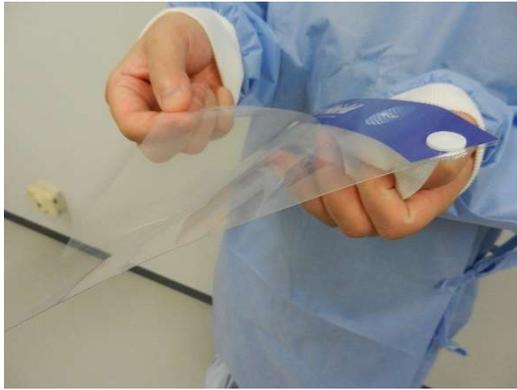

⑩シールドからカバーフィルムを剥離します。



⑪キャップの上から被り、ウレタンフォームが額にあたるよう位置を調節します。シールドを通して見やすい角度になるよう被る深さを調節します。



⑫手袋を、ガウンの袖（白色リブ）を覆うよう深く装着します。



！ 装備完了！

!! Check !!

- 肌が露出していませんか。
- 頬や鼻部に隙間がありませんか。

プリコーションセット サージカルガウンPRS-801 脱衣ガイド (外す)

感染経路を断ち、安全を守るために



- ①手袋を消毒します。
(消毒用エタノールまたは次亜塩素酸)



- ②手首近くの縁の外側をつまみ裏表反対になるように手から脱がしていきます。



- ③手袋を脱いだ手の指先をもう一方の手袋の縁の内側に滑り込ませて同様に裏返しにしながら脱いでいきます。

- ④最後に手が汚染されていないことを確認します。



手指衛生



⑤シールド部分に触れないよう注意しながら、後頭部に手を回し、ゴムバンドを外します。



⑥ガウンの首紐、腰紐を外します。

⑦ガウンの首側から脱ぎ下ろし、汚染された外側を内へ丸め込んで一塊にします。
(内側の衣服、身体、素手がガウン外側に触れないよう注意してください。)



⑧シューズカバーの口縁部から内側に指先を差し込み、汚染された外側が隠れるように内から外へ丸め込むように、足首のゴム紐も外しながら脱いでいきます。



手指衛生



⑨キャップ紐の結びをほどきます。



⑩キャップの外側に触れないよう
首元から指を差し入れて外します。



⑪マスクの表側に触れないように、上下ゴムバンドの下側から上に持ち上げる
ようにして2本一緒に外していきます。

※脱衣中、および脱衣後は、石鹸による手洗いもしくはアルコール製剤による消毒を行ってください。

!! Check !!

- 表面は全て汚染していると考えて触れないようにしましょう。
- 脱いだものは感染性廃棄物袋へ捨てましょう。

プリコーションセットオーバーオール 着衣ガイド（着ける）

感染経路を断ち、安全を守るために


装備品	<input type="checkbox"/> オーバーオール	<input type="checkbox"/> 手袋	<input type="checkbox"/> マスク
	<input type="checkbox"/> シューズカバー	<input type="checkbox"/> フェイスシールド	



①足元からオーバーオールを装着します。



②両腕を通し、ファスナーを首元まで上げます。
(一番上まで上げないように注意します)

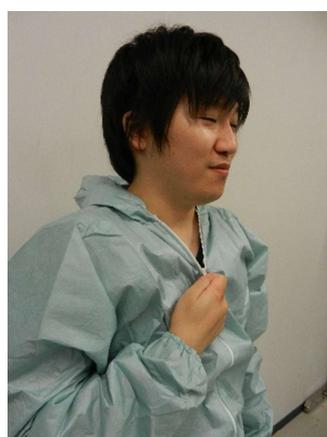


③靴を履き、靴の上からシューズカバーを膝下までを覆うように装着します。



④足首のゴムを足に通して、足首を固定します。



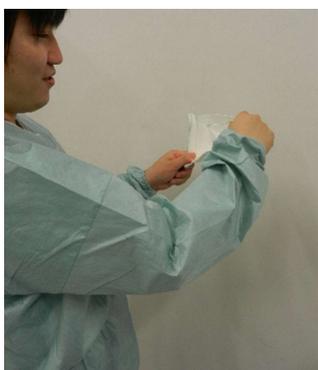

⑤マスクを上下に広げ、ノーズクランプを鼻に合うように軽く曲げます。



⑥マスクを顔に当て、上側ゴムを頭頂部に、下側ゴムを首にかけて固定します。隙間ができないようにノーズクランプを顔に合わせ、空気の漏れがないかフィットチェックします。



⑦フードは髪の毛を全部覆うようにし耳、額が隠れるように深くかぶります。



⑧あごの下までファスナーを上げます。



- ⑨シールドからカバーフィルムを剥離します。
フードの上から被り、ウレタンフォームが額にあたるよう位置を調節します。
シールドを通して見やすい角度になるよう被る深さを調節します。



- ⑩手袋は、オーバーオールの袖を覆うよう深く装着します。



！ 装備完了！

!! Check !!

- 肌が露出していませんか。
- 頬や鼻部に隙間がありませんか。

プリコーションセットオーバーオール 脱衣ガイド (外す)

感染経路を断ち、安全を守るために



- ①手袋を消毒します。
(消毒用エタノールまたは次亜塩素酸)



- ②手首近くの縁の外側をつまみ
裏表反対になるように手から
脱がしていきます。



- ③手袋を脱いだ手の指先をもう一方の手袋の縁の内側に滑り込ませて同様に裏返しにしながら脱いでいきます。

- ④最後に手が汚染されていないことを確認します。



手指衛生



⑤シールド部分に触れないよう注意しながら後頭部に手を回し、ゴムバンドを外します。



⑥シューズカバーの口縁部から内側に指先を差し込み、汚染された外側が隠れるように内から外へ丸め込むように、足首のゴム紐も外しながら脱いでいきます。



手指衛生



⑦ファスナーを首元まで下ろします。



⑧片方の手でフードの付け根を持ちフードを裏返すように外します。



⑨ファスナーを下までおろします。



⑩オーバーオールの両肩から外し
両腕が表面に触れないように脱ぎます。



⑪オーバーオールの表面を包み込むように下まで下げて脱ぎます。



手指衛生



⑫マスクの表側に触れないように、上下ゴムバンドの下側から上に持ち上げる
ようにして2本一緒に外していきます。

※脱衣中、および脱衣後は、石鹸による手洗いもしくはアルコール製剤による消毒を行ってください。

!! Check !!

- 表面は全て汚染していると考えて触れないようにしましょう。
- 脱いだものは感染性廃棄物袋へ捨てましょう。